


# 血液型検査の留意点

## 【不規則性抗体】

検査機器	VISION Max		オーン
検査試薬	カラム	バイオビュー抗IgGカセット	オーン
		バイオビューニュートラルカセット	オーン
	反応増強剤	BLISS	オーン
血球試薬		バイオビュースクリーンJ	オーン
		リゾルブパネルC	オーン

- 1) 本検査は、37℃で反応する血清中の不規則性抗体の検出を目的としています。
- 2) クームス法は抗IgGクームスを使用したLiss・クームス法を、酵素法はフィニン2段法を実施致します。  
上記の検査法以外で予め検査を実施し、改めて当社に検査を依頼された場合、検査手法に基づく反応性の違いによりデータが乖離する例があります。
- 3) パネルセルとの反応の強さやパターンによって、存在する不規則性抗体を同定できない場合があります。
- 4) 最近輸血を受けた患者では、正しく判定できない場合があります。
- 5) 検査案内書に記載された要件と異なる検体材料・量・容器にてのご依頼に対しては、検査を受諾できない場合がありますので、ご注意ください。
- 6) 陽性の場合、検査結果のご報告は「別紙」となります。

図3 不規則性抗体検査手順

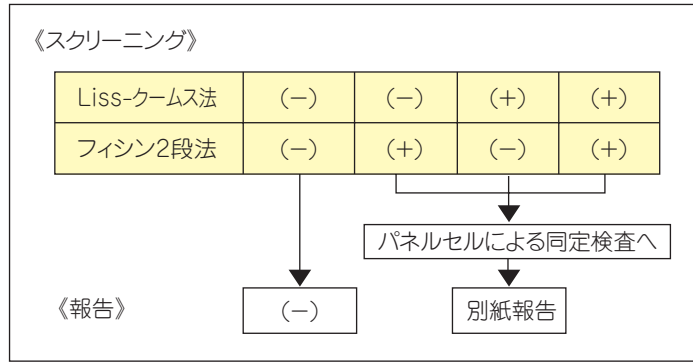

ID		001234567890		検査日		20XX/XX/XX																															
医療機関		〇〇〇病院																																			
氏名		リンショウ ハナコ		性別		女																															
カルテNo.		123456		生年月日		2000/01/01																															
Cell#	Rh-ir	DonorNo	D	C	E	c	e	f	C <sup>W</sup>	V	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	J <sup>s</sup>	J <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	Xg <sup>a</sup>	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	S	s	M	N	Pi	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>	Special Antigen Typing	IAT	Fic 2段		
1	BV3_1	R1wR1	910519	+	+	0	0	+	0	+	nt	+	+	0	+	0	+	+	+	0	0	0	+	+	0	+	+	+	W	0	+	0	+		0	0	
2	BV3_2	R2R2	920504	+	0	+	+	0	0	0	nt	0	+	0	+	0	+	+	0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	0	+	+	+		2+	1+		
3	BV3_3	r	930407	0	0	0	+	+	0	nt	0	+	0	+	0	+	+	+	0	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+		0	0		
Lot: BS1980		Exp: 0000/00/00																																			
4	Re0_1	R1wR1	311347	+	+	0	0	+	0	+	0	+	0	+	nt	+	+	+	0	0	0	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	0	+		0	0	
5	Re0_2	R1R1	319388	+	+	0	0	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	0	S	0	+	0	+		0	0	
6	Re0_3	R2R2	324423	+	0	+	+	0	0	0	0	+	0	+	nt	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+	+	+	+	S	0	+	0	+		1+	w+	
7	Re0_4	R0r	333394	+	0	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	0	0	+	+	0	0	0	+	+	+	+	+	0	+	0	+		0	0		
8	Re0_5	r	327253	0	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	0	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	@		0	0	
9	Re0_6	r	323335	0	0	+	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	0	0	+	0	+	@		1+	w+	
10	Re0_7	r	333374	0	0	0	+	+	0	0	-	+	0	+	nt	-	0	-	0	-	0	+	+	+	+	+	0	+	0	+	0	+	@		0	0	
11	Re0_8	r	331423	0	0	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	0	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		0	0		
12	Re0_9	r	320882	0	0	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	0	+	0	0	0	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	+	Class1(+)		0	0
13	Re0_10	r	333342	0	0	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	0	+		0	0	
14	Re0_11	R1R1	318021	+	+	0	0	+	0	0	0	+	0	+	nt	+	0	+	+	+	0	+	0	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+		0	0	
Lot: RC558		Exp: 0000/00/00																																			
患者抗原		+ + 0 0 +																										自己対照		0 NT							

## 【判定結果とコメント】

抗Eを保有しています。  
患者Rh血液型    CCDee