


○直接塗抹法

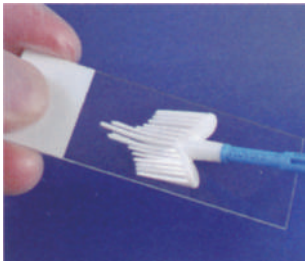

サーベックスブラシ™ または
サーベックスブラシ™ コンビ



エンドサーベックスブラシ™

- ・ ブラシの両面をすばやく均一に塗抹してください。
- ・ 検体塗抹後、**直ちに**サイトキープ、スプレー、95%エタノール等（以下、固定剤）で固定してください。
※ 乾燥しないように注意してください。
- ・ 依頼書添付のスライド専用ラベルに**必ず鉛筆**で患者名（フルネーム）、固定方法を記載し貼付してください。
※ 一度貼って剥がしたラベルは再利用せず、新しいものを使用してください。
※ ラベルは出来るだけスライドガラスからはみ出さないように貼付してください。