

○ BD SurePath™ 法



- ・ 採取方法は、それぞれの採取器具の取扱説明書を必ず参照してください。
- ・ 固定液入りバイアルに採取器具を入れて、採取した細胞をよく洗い流して提出してください。
- ・ 開口部端に先端を引っかけて柄を引き抜いてください。
※ 小さい開口部側に採取器具の先端を入れないでください。
- ・ 蓋をしっかりと閉めて提出してください。
※ バーコードやラベルはバイアルのくぼみに被らないように貼ってください。