

○ ThinPrep 法



- ・ 採取方法は、それぞれの採取器具の取扱説明書を必ず参照してください。
- ・ 細胞採取後は、**ブラシをバイアル内のプレザーブサイト液に浸し、容器の底で毛先が広がるように素早く 10 回押し付けてください。**
- ・ バイアル内で最後に強くかき回しブラシを破棄してください。
※ **採取器具の先端をバイアル内に入れたまま提出しないでください。**
- ・ 蓋の黒いラインがバイアルの黒いラインを超えるようにバイアルの蓋をしっかりと閉めて提出してください。