

尿検体の採取方法（採取容器 A79）




検体の採取

容器に初尿を採取します。スポイトを用いて、初尿をコバスPCRメディアに移します。

注意 初尿は採取後2～30℃で24時間以内にPCRメディアに移してください。


女性の尿を採取する前は消毒しないでください。

最後の排尿から少なくとも1時間以上経過していることを確認してください。

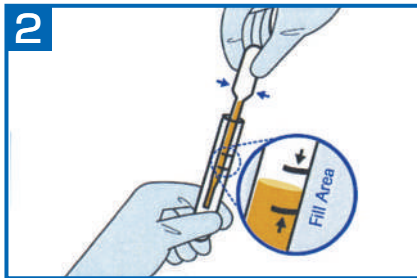

検体輸送液への懸濁

コバスPCRメディアに記載されている2つのラインの間に収まるように初尿を加えてください。

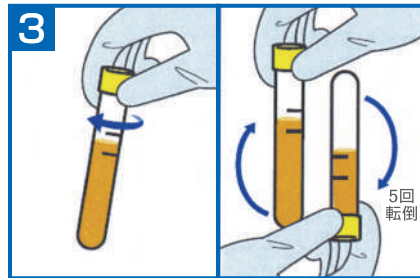

検体容器の保管

キャップをしっかりと閉めてください。容器を5回転倒混和させてください。