


うがい検体の採取方法（採取容器 A79）



うがいの仕方


生理食塩水をコップに15～20mL入れてください。15～20mLを口に含み、顔を上に向けて10～20秒間、勢いよく“ガラガラ”とうがいを行います。

注意 口に含んで吐き出した液とうがい用容器に残した液を合わせて“うがい液”とします。検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことなどは避けてください。

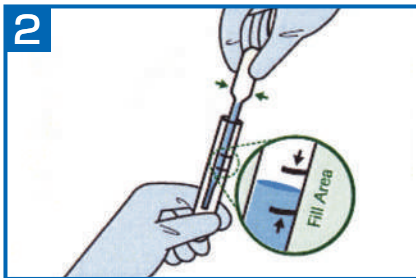

検体輸送液への懸濁

“うがい液”全量をうがい用容器に回収し、スポイトでコバスPCRメディアに記載されている2つのラインの間に収まるように加えてください。

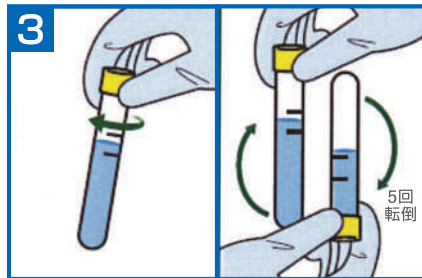

検体容器の保管

キャップをしっかりと閉めてください。容器を5回転倒混和させてください。