


うがい検体の採取方法(採取容器A79)

うがい液検体の採り方

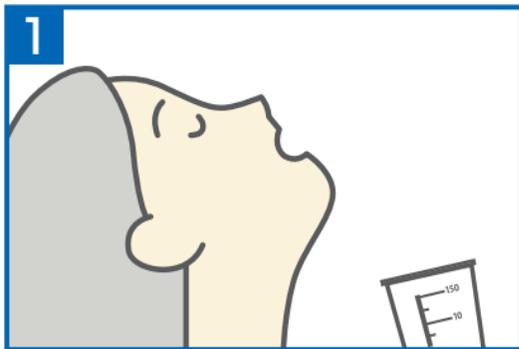


うがいの仕方

生理食塩水(日局方など)をコップに15~20mL入れてください。

生理食塩水15~20mLを口に含み、顔を上に向けて10~20秒間、勢いよく“ガラガラ”とうがいを行います。


注意 口に含んで吐き出した液とうがい用容器に残した液を合わせて“うがい液”とします。
検体採取前の食事・うがい・歯磨き・ガムを噛むことは避けてください。

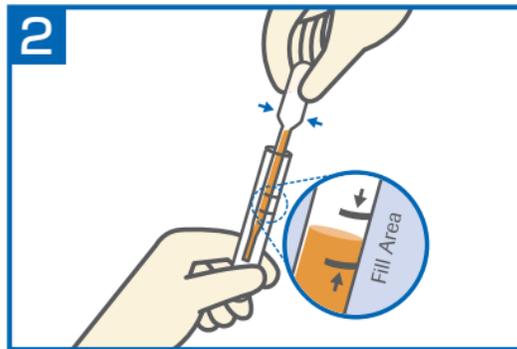

検体輸送液への懸濁

“うがい液”全量をうがい用容器に回収し、スポイトでコバスPCRメディア(尿・うがい用)に必要な量添加します。

注意 “うがい液”はコバスPCRメディアに記載されている2つのラインの間に収まるように加えてください。

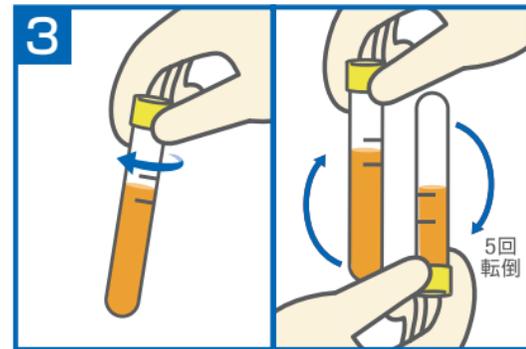

検体容器の保管

コバスPCRメディアの蓋をしっかりと閉めてください。

コバスPCRメディアを5回転倒混和させてください。